

この度は「ポスチャードクター」をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
本書はよくお読みの上、いつでも取り出せるよう大切に保管してください。

### ⚠ 使用上の注意

- 着用中、身体に異常を感じた場合は直ちに使用を止める。その後、医師や専門家に相談してください。
- 本製品は姿勢のサポートを目的としており、上体や背骨を治療するものではありませんので、治療目的で本製品を使用しない。
- 通院中の方や成長期の方、アレルギー体質の方、ヘルニアを発症している方、脊髄損傷の経験がある方、動脈瘤を指摘されたことがある方、血行障害がある方は、使用前に必ず医師に相談する。
- 妊娠中の方、妊娠の可能性のある方は使用しない。
- 本製品は必ず肌着や衣服の上から着用し、肌に直接当てない。
- 最初は10分位の着用から始めて、身体が慣れてきたら、徐々に着用時間を延ばすようにする。
- 無理な締め付けは身体に負担が掛かるので行わない。
- 本製品の補助効果には個人差がある。
- 摩擦により、他の衣類や下着（特に白系）、淡色系の繊維製品に色移る可能性があるため、注意する。
- 金属アレルギーのある方は使用を控える。本製品の一部には銅繊維を使用していますので、万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合は直ちに使用を止め、医師に相談してください。

### 着用方法

本製品は以下の調節方法に沿って、事前に背負える形にしておく必要があります。

#### 調節ベルトの調整

本製品を裏面にして、内側から面ファスナーをリングに通してください。通した後は調節ベルトの下部にくっつけてください。  
※調整後に調節ベルトがねじれないようにしてください。



#### バックストラップの調整

※お好みのフィット感と快適さになるようにバックストラップを上下に調整してください。  
右写真を参照にして調節してください。着用時に上半身の真ん中ぐらいに来るように調節してください。



## 着用方法



1 本製品を内側に向けて持ってください。



2 リュックサックを背負うように本製品を装着します。  
※装着する際、面ファスナーを調節ベルトの一番下に固定しておくことで広くなり装着がしやすくなります。



3 左右の調節ベルトの黒いストラップ部分を引っ張り、ご自身の身体にフィットするように（肩が適度に引っ張られる所）調節し、面ファスナーを固定してください。



4 左写真のような形になっていれば、適正にフィットしています。ご自身の背筋がしっかりと伸びる箇所固定してください。

※過度に調節ベルトを引っ張り、固定しようとししないでください。身体に負荷が掛かり、異常を引き起こす恐れがあります。

※取り外す際はあらかじめ調節ベルトを全て外しておく、取り外しやすくなります。

## お手入れ方法

水またはぬるま湯で中性洗剤または石鹼を使用し、手洗いしてください。

手洗い洗濯後は風通しの良い場所で吊り干し乾燥させてください。

乾燥機は使用できません。

※洗濯機の使用はお止めください。

## 製品仕様

適応サイズ	フリーサイズ（目安体型：胸囲 76 cm～ 100 cm）
素材	ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン ※一部の繊維には銅繊維が使用されています。

### 【発売元】

株式会社テレビショッピング研究所

〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-25-7

☎ 0120-024-242

受付時間 9:00～18:00（祝日休み）