

仕様

商品名	コッパーフィット ウォークフリー
内容量	2枚入り
カラー	ブラック
サポート位置	土踏まず
サイズ	フリー（足の甲周囲適用サイズ：22～32cm）
重量	約 23.5g（1枚）
材質	本体：ナイロン 92%、ポリウレタン 8% ※一部の繊維には銅繊維が使用されています。 補助ベルト：ポリエステル 100%（ラテックスフリー）
生産国	中国

※商品改良の為、デザイン・仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

All Copper Fit Trademarks
Are Owned By Ideavillage
Product Corp. Wayne, NJ 07470
MADE IN CHINA ©2021
CopperFitUSA.com

【発売元】
株式会社テレビショッピング研究所
〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-25-7
☎0120-024-242
受付時間 9:00～18:00（祝日休み）

CFWF_M_JPN_V3_240111

COPPER
Fit
WALK FREE

コッパーフィット ウォークフリー

取扱説明書

- ・本製品は左右兼用です。
- ・本製品は足裏アーチの負担をサポートするものであり、治療用ではありません。

安全上の注意 ※必ずお読みください

- ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の程度を明示するために、以下の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本書に示されるご使用方法に従ってください。本来の目的以外にご使用にならないでください。



警告

- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の方は使用しない。
 - ・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
 - ・装着部に怪我、骨折、変形、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある方。
- 長時間装着する場合は適宜装着し直す。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こす恐れがあります。
- サポーター本体をきつく締めすぎない。
- 本製品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談する。使用を続けると症状が悪化する原因となります。
 - ・装着時に違和感がある場合
 - ・装着部に怪我、骨折、変形、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合
- 本製品を乳幼児などの手の届くところに保管しない。首などに巻き付けて、窒息や傷害に至る原因となります。



注意




- 左右・表裏を確認して使用する。
- 面ファスナーが衣類につかないように装着する。
- 屋内での使用は、生地の種類上すべることがあるので、注意する。
- 本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があるので、注意する。



- 就寝中は使用しない。

セット内容と各部の名称

サポーター本体 × 2

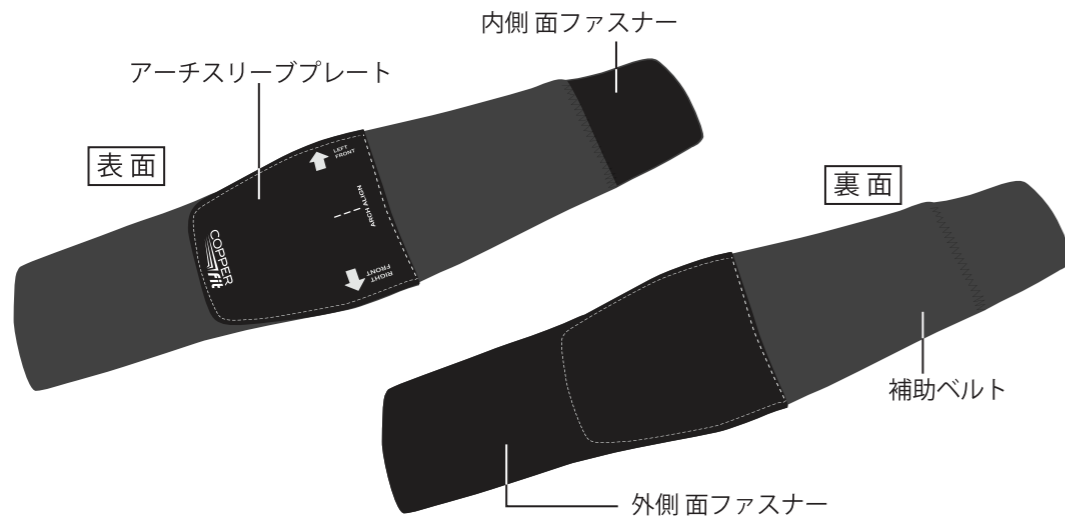

⚠️ 靴を履いて使用する場合の注意


- パンプスやヒールのある靴との併用は絶対にしないでください。歩行中に転倒や怪我をする原因となります。
- 本製品を装着したまま、靴を履く場合はハイカットやバスケットタイプなどの履き口がくるぶしよりも高い位置にくるものを使用しないでください。
- きつすぎると感じた場合はすぐに使用を中止してください。

装着方法

- ① 面ファスナーを外し、サポーター本体を床などの平らな面に置きます。
- ② アーチスリーブプレートの上に土踏まずがくるように足を置きます。


左足に装着する場合

アーチスリーブプレートに印字されている「LEFT FRONT」がつま先の方向を向いていることを確認してください。

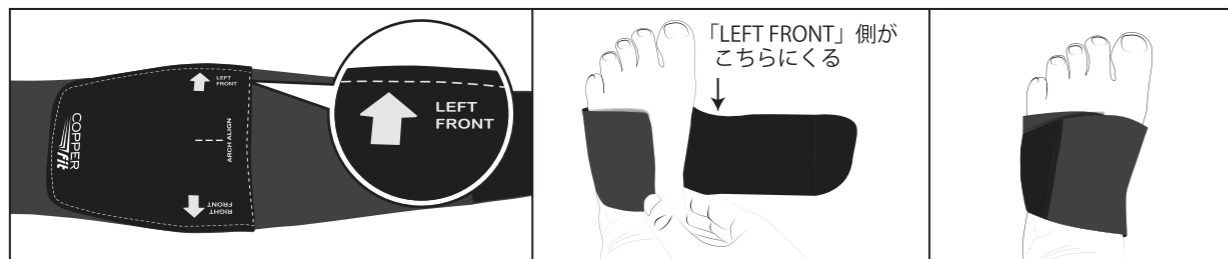

右足に装着する場合

アーチスリーブプレートに印字されている「RIGHT FRONT」がつま先の方向を向いていることを確認してください。

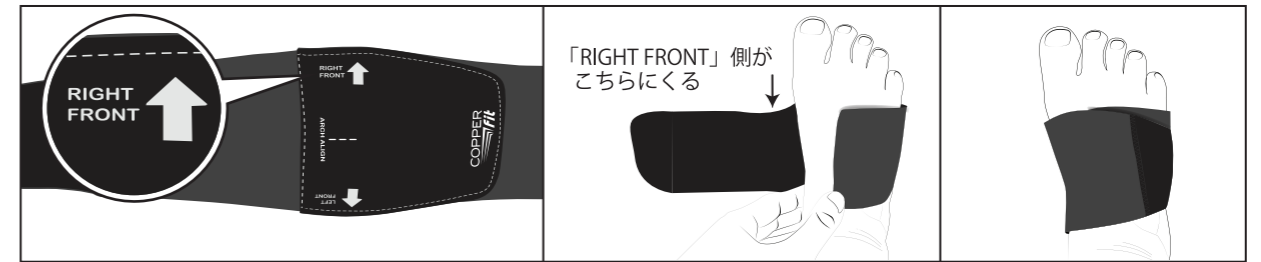

- ③ 外側面ファスナーを足の甲まで伸ばし、次に補助ベルトを持って内側面ファスナーを足の甲まで伸ばして固定します。
- ④ サポーターの緩みやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、初めから装着し直してください。

お手入れ方法

- 本製品は手洗いのみです。ドライクリーニング、ウェットクリーニング、タンブル乾燥の使用はできません。
- 手洗いの際は、面ファスナーをとめてください。とめずに手洗いすると、面ファスナーのつきが悪くなる恐れがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤、酸素系漂白剤は使用できません。

保管方法

ホコリや湿気の少ない、直射日光の当たらない場所、高温にならない場所、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

廃棄について

各自治体の指示に従って、廃棄処分してください。